



Abilar 10% Kådsalva är en mångsidig och bevisad effektiv sår salva

Abilar® 10% Kådsalva har utvecklats av finska läkare och har vetenskapligt bevisat effektivitet vid lokal sår läkning. Abilar® 10% Kådsalva bibehåller optimala förhållanden i såret och främjar därmed läkning. Abilar® 10% bildar ett skyddande skikt på huden, som håller såret lämpligt fuktigt och fri från föroreningar

Abilar® Kådsalva är den enda kådsalvan på marknaden som är en klass IIb CE-märkt hälsovårdsprodukt (NB nro 0537). Klass IIb garanterar kvalitet och säkerhet även i krävande sårvård på sjukhusnivå.

Abilar® har bevisat påskynda sår läkning och lugna irritation på det behandlade området.

Abilar® 10% Kådsalva användningsområden

- Akuta sår, skråmor, skrubbsår
- Asfaltexem
- Bit- och sticksår
- Nagelvallsinfektion
- Svinkoppor
- Brännskador
- Blåsor
- Infekterade sår
- Operationssår
- Svår läkta sår så som trycksår, bensår och diabetessår
- Hudsprickor på fingerspetsen, hälen, runt munnen



Abilar® 10% Kådsalva gör behandlingen enkel

Rengör och torka såret innan du applicerar salvan. Applicera ett tunt lager Abilar® 10% Kådsalva direkt på såret 1-2 gånger dagligen. Det behandlade området skyddas med plåster, sårkompress eller gasvävskompress.

Akuta sår

Första hjälpen för akuta sår är att stilla en eventuell blödning och skydda såret från föroreningar. När Abilar® 10% Kådsalva används direkt efter att såret uppstått, förhindrar det såret att infekteras och minskar risken för en eventuell inflammationsreaktion samt påskyndar sår läkningen.

Långvariga svår läkta sår

Vid långvariga sår ska orsakerna till sårets uppkomst utredas och såren ska behandlas på bästa möjliga sätt.

Sårbehandlingen går till på det sättet att salvan appliceras på sår bädden och såret skyddas med en sårkompress. I samband med byte av kompress ska såret rengöras, torkas och ett nytt lager Abilar® 10% Kådsalva appliceras på såret. Sårbehandlingen upprepas var 1-3 dag efter behov. Behandling och omläggning av vätskande sår ska ske en gång om dagen.

Vid behandling av sårkaviteter, punkterade bölder eller andra krävande sår ska läkarens eller sårspecialistens instruktioner följas.

Hur lång är behandlingstiden?

Abilar® 10% Kådsalva används tills såret är läkt. Akuta sår läks ofta inom några dagar eller veckor. Vid långvariga svår läkta sår kan läkningen ta flera månader.

Observera att sår som innehåller död vävnad kan i början av behandlingen se ut som om det blir större när Abilar® 10% Kådsalva rensar upp såret.

Kontraindikation

Använd inte Abilar® 10% Kådsalva ifall du är överkänslig mot harts (colophonium) eller andra ingredienser.

RECEPTFRITT PÅ APOTEK



Repolar Pharmaceuticals Oy
Finländarvägen 7
02270 Esbo
www.repolar.com
info@repolar.com

REPOLAR
PHARMACEUTICALS



Abilar® 10%

Pihkasalva

Tehokkaaseen haavanhoitoon!

REPOLAR
PHARMACEUTICALS



Abilar® 10 % Pihkasalva on monipuolinen ja tutkitusti tehokas haavasalva

Suomalaisten lääkäreiden kehittämällä Abilar® 10% Pihkasalvalla on tieteellisesti tutkittu teho haavojen paikallishoidossa. Abilar® 10% Pihkasalva ylläpitää haavassa optimaalisia olosuhteita ja siten edesauttaa paranemista. Abilar® 10% muodostaa haavan päälle ulkopuolisilta kontaminaatioilta suojaavan kerroksen sekä pitää haavan sopivan kosteana.

Abilar® on markkinoiden ainoa pihkavoide, joka on luokan IIb CE-merkitty terveydenhuollon tarvikkeeksi (NB nro 0537). Luokka IIb takaa laadun ja turvallisuuden vaativassakin sairaalataso haavanhoidossa.

Abilar® nopeuttaa todistetusti haavojen paranemista sekä rauhoittaa hoidettavan alueen ärsytystä.

Abilar® 10% Pihkasalvan käyttökohteet

- Akuutit haavat, naarmut, ruhjeet, hankaumat
- Asfaltti-ihottumat
- Purema- ja pistohaavat
- Kynsivallintulehdukset
- Märkärupi
- Palovammat
- Rokkorakkulat
- Tulehtuneet haavat
- Leikkaushaavat
- Pitkittyneet / vaikeat haavat mm. paine-, sääri- ja diabeettiset haavat
- Ihoalkeamat eli pykimät: sormenpäät, kantapäät, suupielet



Abilar® 10% Pihkasalvalla hoito on helppoa

Ennen salvan levittämistä, haava tulee puhdistaa ja kuivata. Abilar® 10% Pihkasalvaa levitetään ohut kerros suoraan haavaan 1-2 kertaa päivässä. Tarvittaessa hoidettava alue peitetään suojaavalla ja hengittävällä laastarilla, haavataitoksella tai sideharsotaitoksella.

Akuutit eli äkilliset haavat

Äkillisen haavan ensiapuna pyritään hillitsemään mahdollinen verenvuoto ja estämään haavan likaantuminen. Kun Abilar® 10% Pihkasalvaa käytetään heti haavan synnyttyä, ehkäisee se haavaa tulehtumasta eli infektoitumasta, rauhoittaa vaurioituneen alueen ihoärsytystä sekä nopeuttaa haavan paranemista.

Pitkittyneet, vaikeahoitoiset haavat

Pitkittyneissä haavoissa tulee selvittää haavan syntyyn vaikuttaneet syyt ja hoitaa ne mahdollisuuksien mukaan.

Haavanhoito toteutetaan levittämällä salvaa haavapohjalle ja peittämällä alue haavataitoksella. Taitoksen vaihdon yhteydessä haava puhdistetaan, kuivataan ja haavalle levitetään uusi kerros Abilar® 10% Pihkasalvaa. Haavan hoito toteutetaan tarpeen mukaan 1-3 vuorokauden välein. Erittävien haavojen hoito ja taitoksen vaihto toteutetaan kerran vuorokaudessa.

Haavaonteloiden, avattujen paiseiden tai muiden vaativien haavojen hoidossa noudatetaan lääkärin tai haavahoitajan antamia ohjeita.

Kuinka kauan hoito kestää?

Abilar® 10% Pihkasalvaa käytetään, kunnes haava on parantunut. Akuutit haavat parantuvat usein muutamassa päivässä tai viikossa. Pitkittyneissä, vaikeahoitoisissa haavoissa umpeutuminen voi kestää useita kuukausia.

On huomioitavaa, että kuollutta kudosta sisältävät haavat näyttävät hoidon alkuvaiheessa suurenevan Abilar® 10% Pihkasalvan puhdistuksessa haavaa.

Vasta-aihe

Älä käytä Abilar® 10% Pihkasalvaa mikäli olet yliherkkä hartseille (colophonium) tai muille valmisteen apuaineille.

SAATAVANA APTEEKISTA ILMAN RESEPTIÄ



Repolar Pharmaceuticals Oy
Suomalaistentie 7
02270 Espoo
www.repolar.com
info@repolar.com

REPOLAR
PHARMACEUTICALS

03-2020



Abilar® 10%
Kådsalva
För effektiv sårvård!

REPOLAR
PHARMACEUTICALS